

Preparación

**1 ANTES DE EMPEZAR**

- Para ejecutar la prueba, todas las piezas del kit de prueba deben estar a la misma temperatura dentro del rango especificado.
- Si el kit ha estado recientemente a altas temperaturas (por sobre los 28 °C/82 °F) o en el refrigerador, deje el kit a temperatura ambiente al menos una hora antes de usarlo.
- Evite ejecutar la prueba con luz solar directa, sobre superficies calientes o frías, o cerca de fuentes de calor o frío.
- Los materiales de control de calidad se deben usar para confirmar que el kit de prueba funciona correctamente. Consulte el inserto del producto para obtener información sobre en qué momento ejecutar los controles.

Monitor (parte posterior)

Realice la prueba en un lapso de 15 minutos.

Base (no la retire!)

Cartucho para prueba en el envase


Colector de sangre

Cuerpo del muestreador

Etiqueta de fecha y número de lote. Asegúrese de que los números de lote coincidan.

2014-01-27 LOT 0628216 CODE A1

0628216

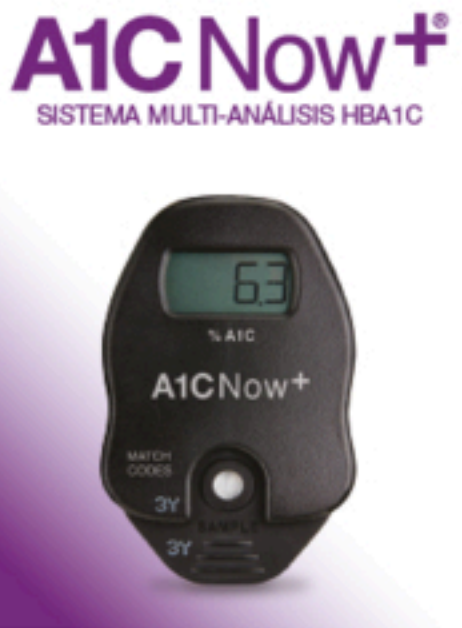

**GUÍA DE PROCEDIMIENTO PROFESIONAL**

Para México y América del Sur

Obtención de la sangre

**2 COLECTOR DE SANGRE**

**Punción dactilar**

Utilice su propio dispositivo de lanceta para extraer la sangre.

Toque cuidadosamente la gota de sangre para llenarlo.

**Extracción venosa**

Mezcle bien la sangre antes de efectuar la prueba.

Obtenga la sangre de una lámina.

Muy poco. Agregue más sangre.

Medida exacta.

Demasiado. Limpie el exceso.

Dilución de la sangre

**3 INSERTE COLECTOR DE SANGRE**

Inserte totalmente el colector de sangre en el cuerpo del muestreador.

Empuje firmemente

¡Siga empujando!

Gíralo ayuda

No insertado totalmente. ¡Siga empujando!

Insertado totalmente

**4 AGITE**

Agite bien de 6 a 8 veces. Esto mezclará la sangre con la solución.

Coloque el muestreador sobre una mesa mientras prepara el cartucho.

**5 INSERTE EL CARTUCHO**

Utilice en un lapso de 2 minutos.

ABRA AHORA

Coloque el cartucho para prueba en su lugar hasta que haga "clic".

¿Coinciden los códigos? \*

Los códigos del monitor y del cartucho para prueba deben coincidir.

\* Si no coinciden, comuníquese con su Grupo de soporte local (consulte en la parte inferior de la caja para conocer la información del país local).

Prueba de sangre

**6 PREPARE EL MUESTREADOR**

ESPERE a que aparezca SMPL

Listo para el muestreador

Retire la base

Asegure el monitor sobre una superficie nivelada.

**7 DEPOSITE LA MUESTRA EN EL CARTUCHO**

Presione hasta el final para depositar la muestra diluida. Retire rápidamente.

No vuelva a manipular el monitor hasta que finalice la prueba.

Resultados

**8 RESULTADOS EN 5 MINUTOS**

Aparece una cuenta regresiva

Resultado de la prueba de control de calidad\*

Resultado

N.º de pruebas restantes

El ciclo de este resultado permanecerá en la pantalla durante 60 minutos o hasta que se inserte un nuevo cartucho para prueba.

\* Si no aparece "OKOK", consulte la lista de códigos de error que se encuentra al reverso.

Si no puede resolver un error, comuníquese con su Grupo de soporte local (consulte en la parte inferior de la caja para conocer la información del país local).

**9 REUTILICE EL MONITOR**

Guarde el monitor

Deseche el cartucho para prueba

EL MONITOR ES REUTILIZABLE

Para ejecutar otra prueba, utilice un muestreador y un cartucho para prueba nuevos del mismo kit y vuelva al paso 1. "PREPARACIÓN"

Número de Lote

Código de Lote

Etiqueta de identificación de lote y fecha del producto (AAAA/MM/DD)

HAGA COINCIDIR SIEMPRE LOS NÚMEROS DE LOTE

Utilice el monitor solamente con los materiales incluidos en el kit original. El monitor caducará una vez ejecutado el número de pruebas programadas. Si se inserta otro cartucho para pruebas, el monitor mostrará "00 TL".